



proHD Set

Anschluss und Trennung – AVF/AVG

Anschluss an die HD

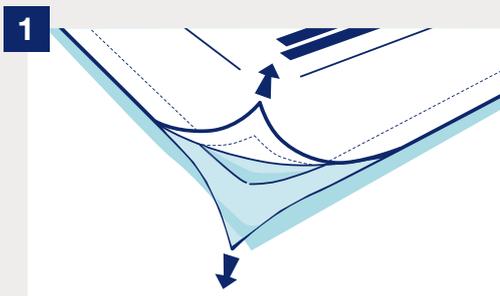


Das **proHD Set** mit der transparenten Seite nach unten auf die Arbeitsfläche legen und die Packung öffnen. Das **Disconnection Set** zur späteren Verwendung beiseite legen.

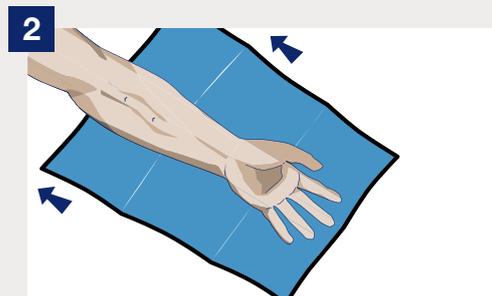


Das Abdecktuch unter den Unterarm legen, an dem der Zugang gelegt wird.




Hautdesinfektionslösung gemäss den lokalen Leitlinien auf die Kompresse tröpfeln.

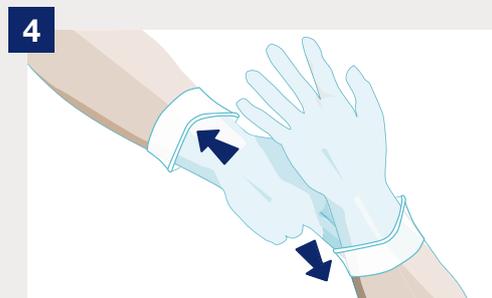

Handschuhe aus dem **proHD Set** anziehen.

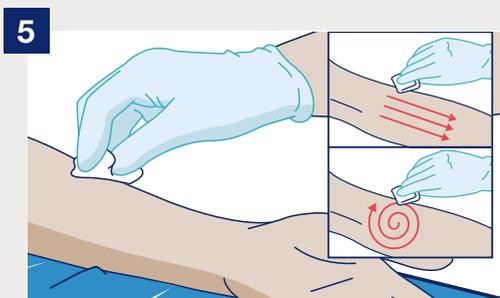


Die Gefässzugangsstelle mit der mit Desinfektionsmittel getränkten Kompresse desinfizieren.

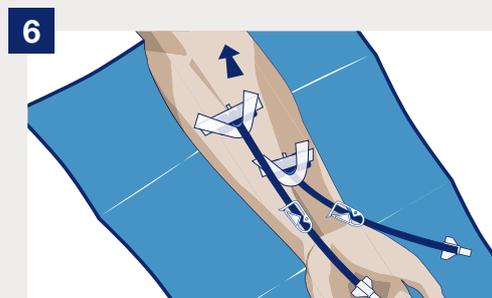

Den Gefässzugang gemäss den lokalen Leitlinien kanülieren. Die Fistelkanüle mit dem Klebeband aus dem proHD Set auf der Haut fixieren.

Schritte für die zweite Kanüle wiederholen.


Trennung von der HD

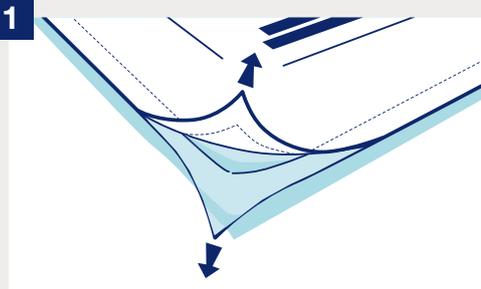

Das **proHD Disconnection Set** mit der transparenten Seite nach unten auf die Arbeitsfläche legen und die Packung öffnen.




Handschuhe aus dem **proHD Disconnection Set** anziehen.

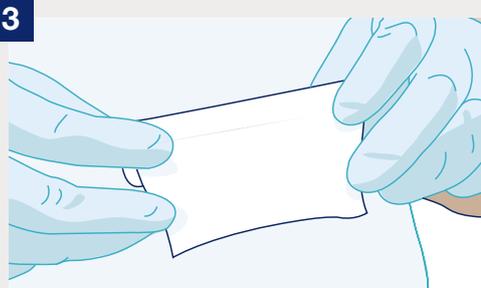

Kompressenquadrate zur Vorbereitung der Blutstillung an der Kanülierungsstelle falten.



Die kanülenfreie Hand des Patienten zur Vorbereitung der Blutstillung mit einem PVC-Handschuh überziehen.

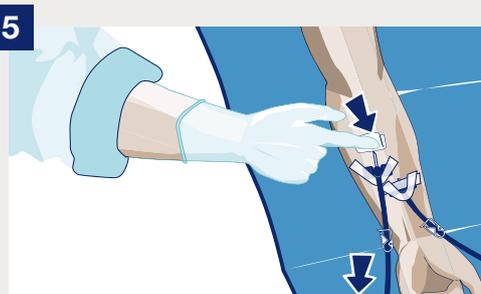

Das Klebeband von der Fistelkanüle entfernen. Die gefaltete Kompresse aus dem **proHD Disconnection Set** auf die Kanülierungsstelle legen. Die Fistelkanüle entfernen.



Druck ausüben, bis gemäss den lokalen Leitlinien eine Blutstillung erreicht ist.

Schritte 5–7 zur Entfernung der zweiten Kanüle wiederholen.



Blutstillendes Pflaster aus dem **proHD Disconnection Set** auf die Kanülierungsstelle kleben.

Glossar:

AVF: Arteriovenöse Fistel
AVG: Arteriovenöse Prothese

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke und als Hilfsmittel für Ihre Schulung vorgesehen. Es umfasst keine medizinische Beratung und ist nicht dazu gedacht, die Einschätzung und/oder die Erfahrung der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte zu ersetzen. Die Behandlung und die Entscheidungen über spezifische Behandlungen der jeweiligen Patienten liegen in der alleinigen Verantwortung der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte. Dieses Dokument ersetzt nicht die persönliche Schulung und die sorgfältige Durchsicht der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) und der Zusammenfassung der Produktmerkmale. Die in den jeweiligen Ländern, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen geltenden Hygienerichtlinien sind stets einzuhalten.