



Kit proHD

Connexion et déconnexion – FAV / GAV


Connexion HD

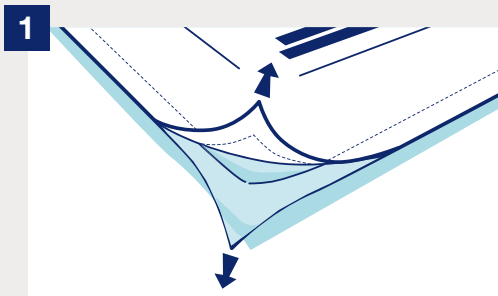


Placer la face transparente du **kit proHD** sur la surface de travail et ouvrir l'emballage. Mettre de côté le **kit de déconnexion** pour une utilisation ultérieure.

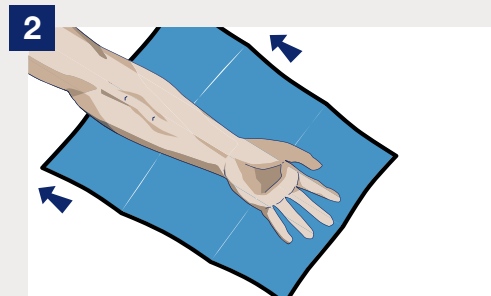


Placer le champ sous le membre de la fistule.

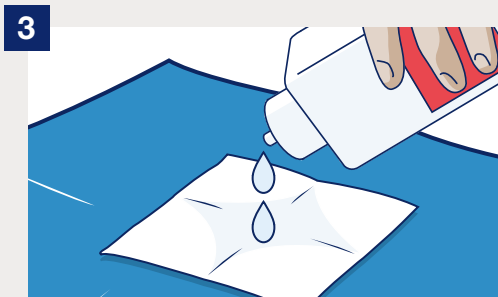


Verser le désinfectant cutané sur la compresse en respectant la procédure locale.

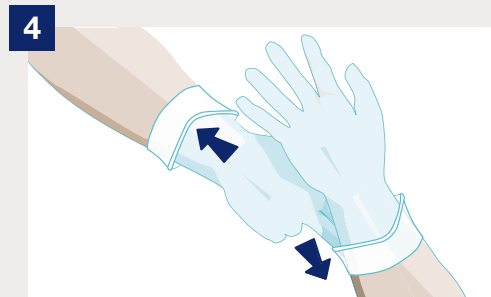

Mettre les gants du **kit proHD**.

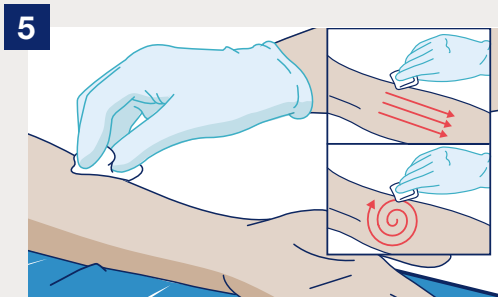


Désinfecter l'accès vasculaire à l'aide de la compresse imbibée de désinfectant.

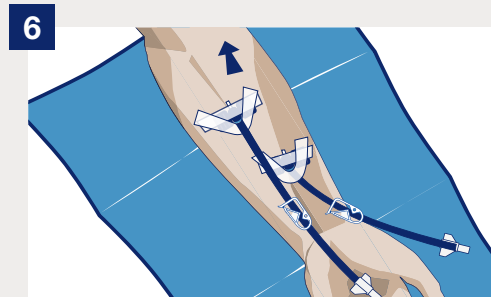


Ponctionner l'accès vasculaire en respectant la procédure locale. Fixer l'aiguille à la peau à l'aide du ruban adhésif du kit proHD.

Répéter les étapes pour la pose de la seconde aiguille.


Déconnexion HD

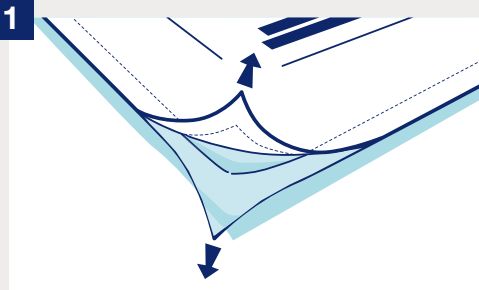

1 Placer la face transparente du **kit de déconnexion proHD** sur la surface de travail et ouvrir l'emballage.

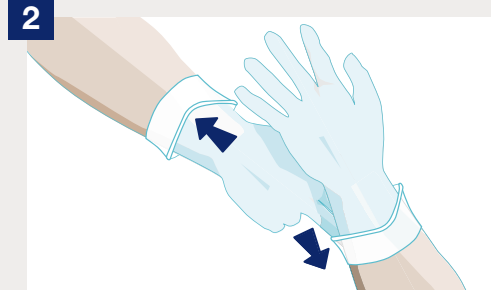


2 Mettre les gants du **kit de déconnexion proHD**.

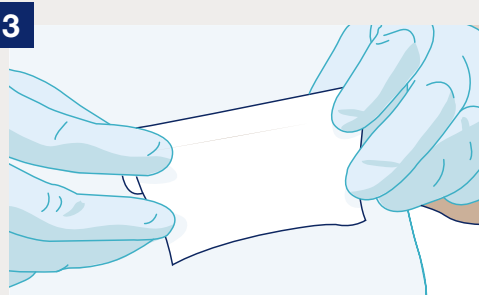


3 Plier les compresses pour préparer l'hémostase du site de ponction.



4 Mettre un gant en PVC sur la main du patient du côté opposé à celui de la fistule pour préparer l'hémostase.

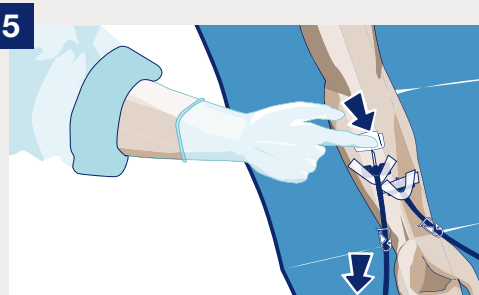


5 Retirer le ruban adhésif de l'aiguille. Placer la compresse pliée du **kit de déconnexion proHD** sur le site de ponction. Retirer l'aiguille à fistule.

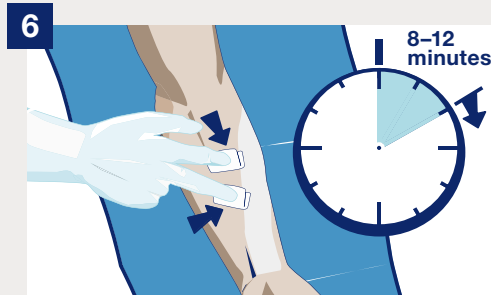

6 Appliquer une pression jusqu'à ce que l'hémostase soit obtenue en respectant la procédure locale.

Répéter les étapes 5 à 7 pour retirer la seconde aiguille.

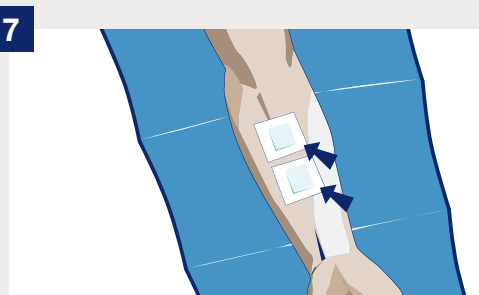

7 Appliquer les pansements hémostatiques du **kit de déconnexion proHD** sur les sites de canulation.

Glossaire :

FAV : fistule artérioveineuse
GAV : greffe artérioveineuse

Clause de non-responsabilité

Ce document est fourni uniquement à titre informatif et est destiné à vous aider dans votre pratique professionnelle. Il ne s'agit pas d'un avis médical et il n'est pas destiné à remplacer le jugement et/ou l'expérience des médecins traitants et des soignants. Les décisions relatives au traitement des patients relèvent de la seule responsabilité des médecins traitants et des soignants. Ce document ne remplace pas une formation personnelle et une lecture attentive du Mode d'emploi et du Résumé des caractéristiques du produit. Les règles d'hygiène propres au pays, à l'hôpital ou à la structure de soin doivent toujours être respectées.