



Set proHD

Connessione e disconnessione – AVF / AVG


Connessione HD

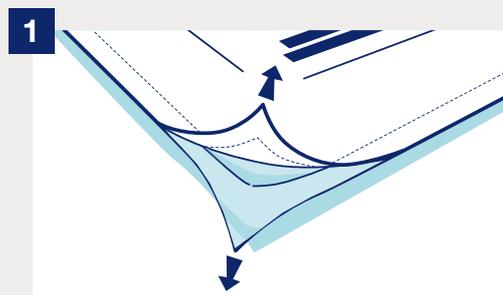

Posizionare il lato trasparente del **set proHD** sulla superficie di lavoro e aprire la confezione. Mettere da parte il **set di disconnessione** per un uso successivo.

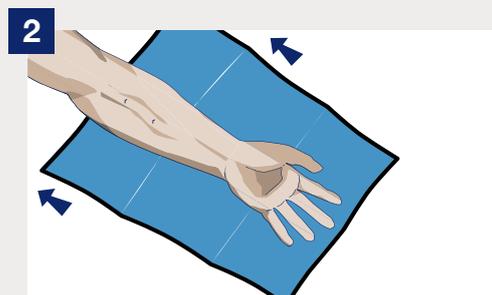


Posizionare il telo sotto l'arto di accesso.

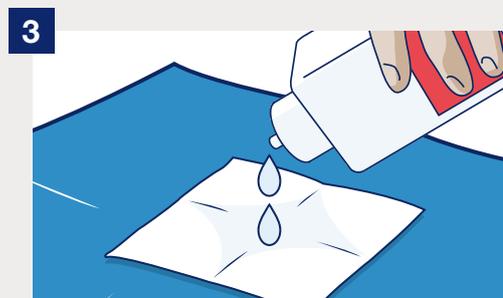


Versare la soluzione per la disinfezione della pelle sulla garza secondo la procedura locale.



Indossare i guanti del **set proHD**.

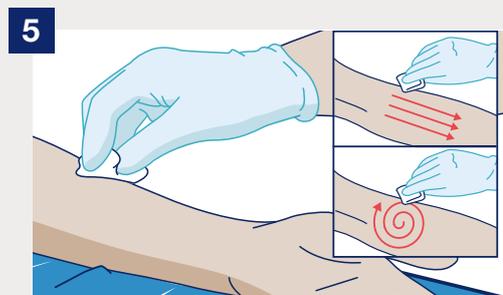


Disinfettare l'accesso vascolare utilizzando la garza imbevuta di disinfettante.

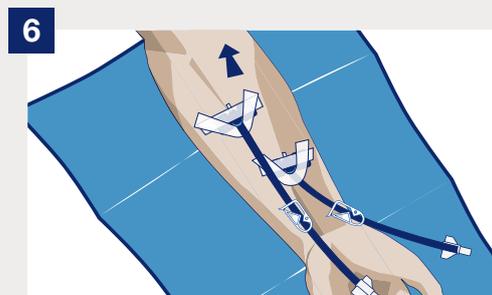

Incannulare l'accesso vascolare secondo la procedura locale. Fissare l'ago della fistola alla pelle utilizzando il nastro del set proHD.

Ripetere i passaggi per la seconda incannulazione.


Disconnessione HD

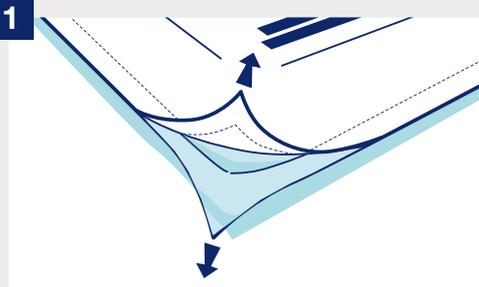

1
Posizionare il lato trasparente del **set di disconnessione proHD** sulla superficie di lavoro e aprire la confezione.




2
Indossare i guanti del **set di disconnessione proHD**.

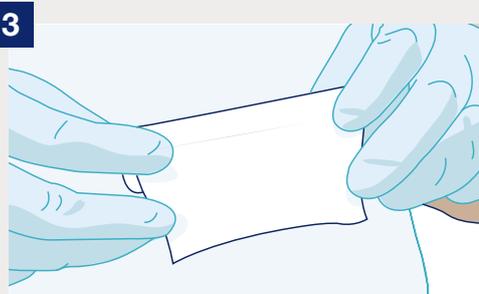

3
Piegare i quadrati di garza in preparazione all'emostasi del sito di incannulazione.



4
Applicare un guanto in PVC sulla mano non fistolosa del paziente per preparare l'emostasi.

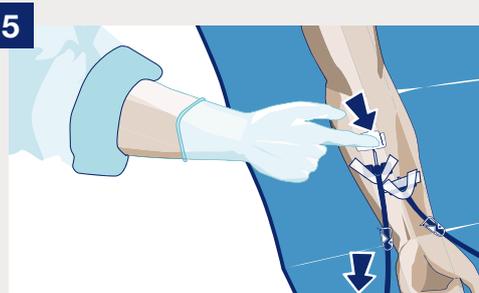

5
Rimuovere il nastro dall'ago della fistola. Posizionare la garza ripiegata del **set di disconnessione proHD** sul sito di incannulazione. Rimuovere l'ago della fistola.



6
Applicare pressione fino a raggiungere l'emostasi secondo la procedura locale.

Ripetere i passaggi 5-7 per la rimozione del secondo ago.



7
Applicare i cerotti emostatici del **set di disconnessione proHD** ai siti di incannulazione.

Glossario:

AVF: fistola arterovenosa
AVG: innesto arterovenoso

Dichiarazione di non responsabilità

Il presente documento ha uno scopo puramente informativo ed è inteso come supporto alla formazione personale. Non è un consiglio medico e non intende sostituire il giudizio e/o l'esperienza dei medici curanti e degli infermieri. Il trattamento e le decisioni relativi a trattamenti specifici per il paziente sono di esclusiva responsabilità dei medici curanti e degli infermieri. Questo documento non sostituisce una formazione personale e un'attenta revisione delle relative Istruzioni per l'uso (IFU) e del Riassunto delle caratteristiche del prodotto. Le linee guida igieniche applicabili in ogni Paese, ospedale o altra struttura devono essere sempre rispettate.